


手元スイッチにかかわる注意事項 1-1

警告

■誤操作を防止するためプラグを抜いてください

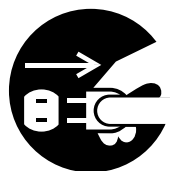

プラグを抜く

- 幼児や操作が理解できないと思われる方（痴呆症の方など）が一人で手元スイッチに触れる可能性がある場合には、電源プラグをその都度抜いて誤操作による事故を未然に防いでください。

注意

■水などをこぼさないでください



感電注意

- モーターや手元スイッチに、水やジュース、味噌汁などをこぼさないでください、安全回路が働いて動かなくなる場合があります。誤ってこぼしてしまった場合には、必ず電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。

■手元スイッチを傷つけないでください



感電注意

- 手元スイッチを落としたり、手元スイッチコードを強く引っ張ったり、はさんだりしないでください。断線して動かなくなる可能性があります。