

手元スイッチの正しい取扱いについて

2008年12月

平素は弊社製品をご利用いただき、厚く御礼申し上げます。

弊社製電動リモートコントロールベッドの手元スイッチを正しくご使用いただくために、製品情報をご案内させていただきます。

この度、お客様から、弊社の電動ベッドに誤って適合しない手元スイッチを取り付けた際、操作していないにも関わらず、アクチュエーター(モーター)が作動し、ベッドの膝ボトムが上がったとの情報を入手しました。

弊社製の電動ベッドには、機種や年代の違いにより適合する手元スイッチが異なる場合がありますが、調査の結果、特定の組合せ(組合せの詳細については裏面をご覧ください)においては、電源プラグをコンセントに差したまま、手元スイッチを電動ベッドに差し込んだ際に、電動ベッドが不意に動作することが判明いたしました。但し、ベッドの電源プラグをコンセントから抜いた状態で、手元スイッチを差し込んだ場合は、その後、ベッドの電源プラグをコンセントに差し込んで、ベッドが動作することはありません。

■お客様へのお願い

電動ベッドと手元スイッチを適切な組合せ(お買い上げ時の組合せ)でご使用いただければ、従来通り安心してご利用いただけます。但し、同じシリーズのベッドであっても、仕様変更等により、適合する手元スイッチが異なる場合がありますので、ベッドから手元スイッチを取り外し、再びベッドへ取り付ける際は、本書裏面もしくは取扱説明書で適合する手元スイッチの形状をご確認ください。

■手元スイッチを取り付ける際の注意事項

万一誤って適合しない手元スイッチを取り付けた場合でもベッドが不意に動くことを防止するため、手元スイッチを取り付ける際は、以下の手順で行なってくださいますようお願い申し上げます。

- ① ベッドの電源プラグをコンセントから抜く
- ② 手元スイッチをベッドのコネクタに挿す
- ③ ベッドの電源プラグをコンセントに挿す
- ④ 手元スイッチのボタンを全て操作して、ベッドが適切に動作することを確認する

※④において、ベッドが動かない場合は、手元スイッチが間違えています(故障の場合は除く)。

なお、弊社ホームページ (<http://www.paramount.co.jp/>) 上では、製品をより安全にご使用いただくためにこれまで発信させていただいた情報(「製品に関する重要なお知らせ」)を閲覧することができます。

常に最新の情報を確認していただくため、定期的に弊社ホームページをご覧くださいませよう、何卒宜しくお願い申し上げます。

■ダウンロードの方法

「製品に関する重要なお知らせ」：弊社ホームページのトップ画面から「製品に関する重要なお知らせ」にお進みください。

ご不明な点がございましたら、弊社コールセンター(フリーダイヤル0120-54-8639 平日9:00~17:20 土、日、祝日、夏季休業、年末年始休業を除く)、もしくは弊社営業担当までお問い合わせくださいますよう、お願い申し上げます。

以上